

Patienteninformation

ewimed



## Was uns auszeichnet



Für uns steht der Patient im Mittelpunkt. Unser Ziel ist es daher, Sie als Patient rundum bestens zu betreuen und Ihnen Sicherheit im Umgang mit den Drainage-Systemen zu geben. Das ewimed Versorgungskonzept garantiert eine schnelle, persönliche und lückenlose Einweisung. Unsere kompetenten Schulungsmitarbeiter kommen bereits seit Jahren zu jedem Patienten nach Hause und geben ihm selbst, seinen Angehörigen oder den Pflegenden in gewohnter Umgebung eine Einweisung in die korrekte Handhabung unserer Drainage-Systeme.

Der Patient muss zur Drainage nicht mehr in die Klinik und kann mehr Zeit mit seiner Familie und Freunden verbringen. Dies steigert die Lebensqualität der Patienten und entlastet gleichzeitig die Kliniken. Das ist uns wichtig und hierauf sind wir stolz.

# Inhalt

2

**Was uns auszeichnet**

4

**Patienteninformation**



6

**Drainage-Anleitung | drainova® Reservoir, Drainage-Set**

Art. Nr.: 2010

Bei Ableitung durch Soft-Vakuum



8

**Drainage-Anleitung | ewimed Drainage-Set, 2000 ml**

Art. Nr.: 50-7505, 50-7505/4

Bei Ableitung durch Schwerkraft



10

**Drainage-Anleitung | PleurX™ Drainage-Set**

Art. Nr.: 50-7500B, 50-7500B/4, 50-7510, 50-7510/4

Bei Ableitung durch Vakuum





## Patienteninformation



### Wie bestellen Sie Drainage-Sets?

Je nachdem wie oft Sie eine Drainage durchführen, sollten Sie rechtzeitig Drainage-Sets nachbestellen.

**Bitte senden Sie hierzu schnellstmöglich Ihr Originalrezept an ewimed an unten angegebene Adresse.**

Wir benötigen **ca. 2–4 Arbeitstage**, um die Systeme an Ihre Adresse zu schicken. Die Pakete werden per Paketdienst direkt zu Ihnen nach Hause geliefert.

### Welche Unterlagen benötigen Sie, um Drainage-Sets nach- zubestellen?

Um mit Ihrer Krankenkasse abrechnen zu können, benötigen wir für die Drainage-Sets **zeitnah** ein **Rezept im Original**.

In der Regel erhalten Sie dieses von Ihrem Hausarzt. Auf dem auf Seite 5 abgebildeten Musterrezept finden Sie die Angaben, die auf dem Rezept stehen sollten.

**Auch für das Paket, welches Sie bei der Patientenschulung erhalten haben, muss innerhalb einer Woche ein Rezept eingereicht werden!**

**Bei Fragen oder  
zur Bestellung von  
Produkten kontak-  
tieren Sie uns unter:**



ewimed GmbH  
Dorfstraße 24  
D – 72379 Hechingen-Boll

Tel.: +49 7471 73972-0  
Fax: +49 7471 73972-13  
E-Mail: [info@ewimed.com](mailto:info@ewimed.com)  
[www.ewimed.com](http://www.ewimed.com)





## Bestellinformationen, die auf dem Rezept stehen sollten:

Hilfsmittel ankreuzen

Hilfsmittel-Nr. eintragen:  
01.24.05.0002

Krankenkasse, bzw. Kostenträger

Angaben zum Versicherten

**Ableitung durch Soft-Vakuum**

Art. Nr.: 2010  
drainova® Reservoir Drainage-Set  
2000 ml, 2 VE à 10 Stück

**Ableitung durch Schwerkraft**

Art. Nr.: 50-7505  
ewimed Drainage-Set  
2000 ml, 2 VE à 10 Stück

**Ableitung durch Vakuum**

Art. Nr.: 50-7510  
PleurX™ Drainage-Set  
1000 ml, 2 VE à 10 Stück

**oder**

Art. Nr.: 50-7500B  
PleurX™ Drainage-Set  
500 ml, 2 VE à 10 Stück

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Hilfsmittel-Nr. **01.24.05.0002**

**Wichtig:** Aktuelle Diagnose

Stempel und Unterschrift des Arztes

### Wichtig!

Die über Ihren Hausarzt verschriebenen Drainage-Sets dürfen nur zu Hause benutzt werden.

Bitte nehmen Sie die Produkte nicht mit ins Krankenhaus, da diese dann nicht von Ihrer Krankenkasse bezahlt werden. Bitten Sie das Krankenhaus, die unser System noch nicht kennen, sich mit uns in Verbindung zu setzen.

Falls Sie Fragen zu der Handhabung der Produkte haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Für alle anderen Fragen ist es immer ratsam, Ihren behandelnden Arzt zu konsultieren!






# Drainage-Anleitung | drainova® Reservoir, Drainage-Set

Art. Nr.: 2010 | Bei Ableitung durch Soft-Vakuum



**Hinweis:** Die jeweils relevanten Bereiche des Produktes sind farblich hervorgehoben.  
Bitte zusätzlich die detaillierte Gebrauchsanweisung sowie die darin enthaltenen Warnhinweise beachten.

- 1** | Material aus dem Verbandmaterial-Set auf dem blauen Abdecktuch bereitlegen.

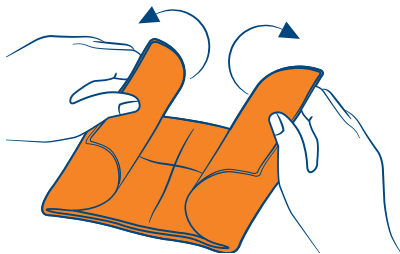


- 2** | Handschuhe an der Öffnung anfassen und wie abgebildet anziehen.



- 3** | Silikonkappe bzw. Schutzkappe vorsichtig abziehen und entsorgen.




Lösen der drainova® Silikonkappe

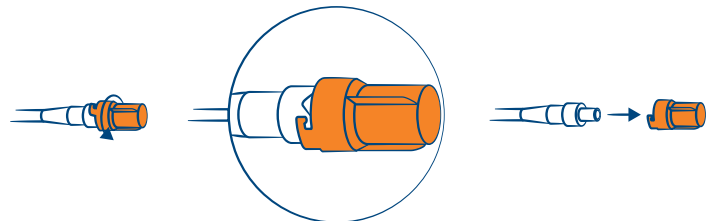


Lösen der PleurX™/drainova® Schutzkappe

- 4** | Sicherheitsventil in die Verpackung eines Alkoholtupfers stecken und reinigen (30 Sekunden Einwirkzeit).

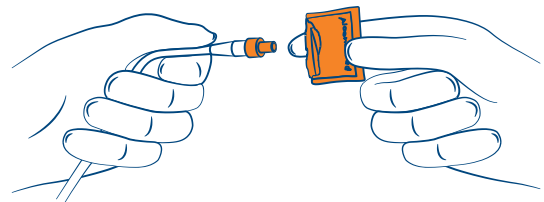




- 5** | **1** Reservoir aus der Verpackung entnehmen und weiße Verschlusskappe entfernen.  
**2** Den Trichteradapter vollständig über den Zapfen schieben.


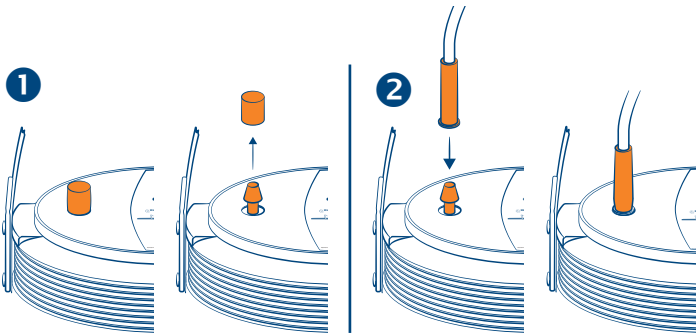


- 11** | Nach erfolgter Drainage Quetschklemme am Anschluss Schlauch schließen.

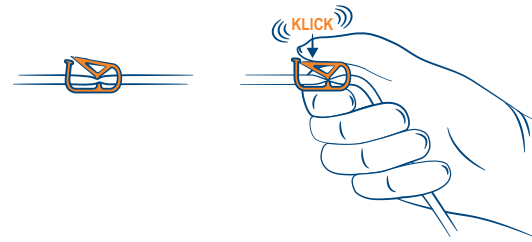

**Hinweis:** Bitte die Drainagemenge am oberen Halteknopf ablesen.

- 6** | Quetschklemme am Anschluss Schlauch schließen.

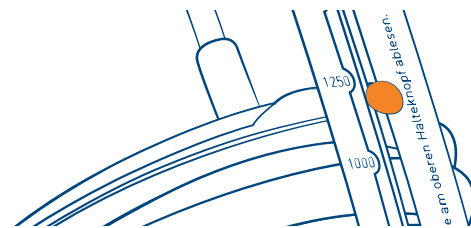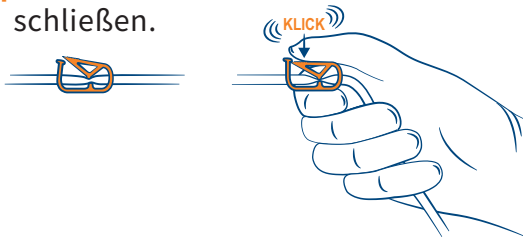

- 7** | Schutzhülle am Einführstift abziehen, ggf. unter leichter Drehbewegung.




- 12** | Sicherheitsventil und Anschluss Schlauch trennen.




- 8** | Einführstift in das Sicherheitsventil schieben. Das Einrasten ist hör- und spürbar.




- 13** | Sicherheitsventil in die Verpackung eines Alkoholtupfers stecken und reinigen (30 Sekunden Einwirkzeit).

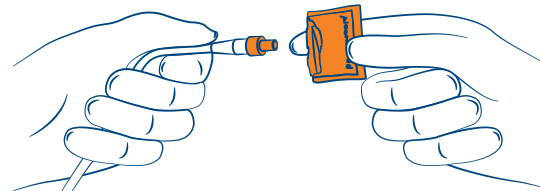


- 9** | **1** Reservoir zusammendrücken.  
**2** Orangefarbene Sicherung entfernen.

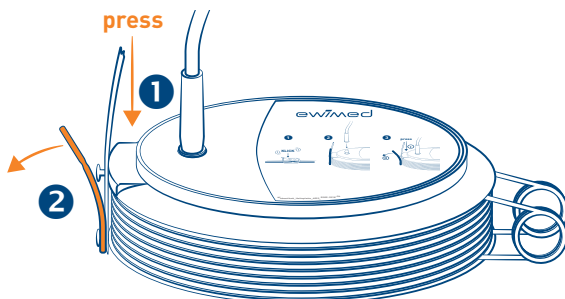

- 10** | Quetschklemme öffnen.  
 Die Drainage beginnt.

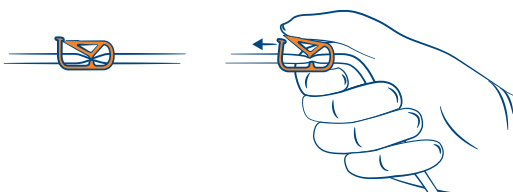

- 14** | Anbringen einer neuen Silikonkappe oder der Schutzkappe.

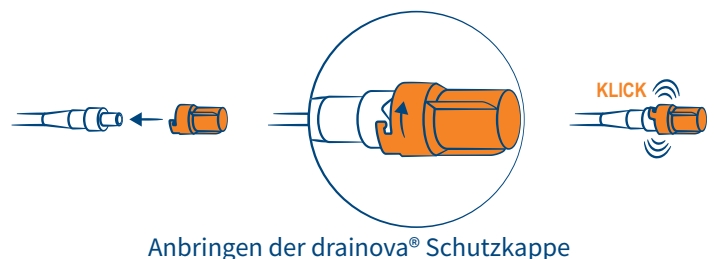




# Drainage-Anleitung | ewimed Drainage-Set, 2000 ml

Art. Nr.: 50-7505, 50-7505/4 | Bei Ableitung durch Schwerkraft



**Hinweis:** Die jeweils relevanten Bereiche des Produktes sind farblich hervorgehoben.  
Bitte zusätzlich die detaillierte Gebrauchsanweisung sowie die darin enthaltenen Warnhinweise beachten.


- 1** | Material aus dem Verbandmaterial-Set auf dem blauen Abdecktuch bereitlegen.

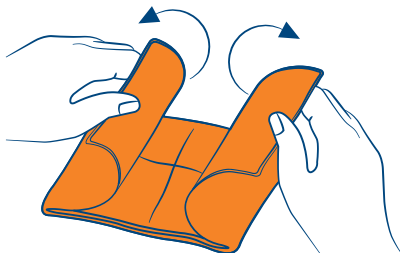

- 2** | Handschuhe an der Öffnung anfassen und wie abgebildet anziehen.




- 3** | Silikonkappe bzw. Schutzkappe vorsichtig abziehen und entsorgen.

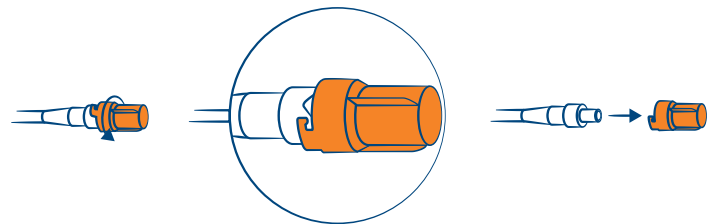

Lösen der PleurX™/drainova® Schutzkappe


- 4** | Sicherheitsventil in die Verpackung eines Alkoholtupfers stecken und reinigen (30 Sekunden Einwirkzeit).

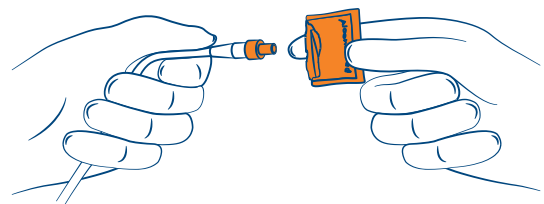





**5** | Quetschklemme am Anschlusschlauch schließen.

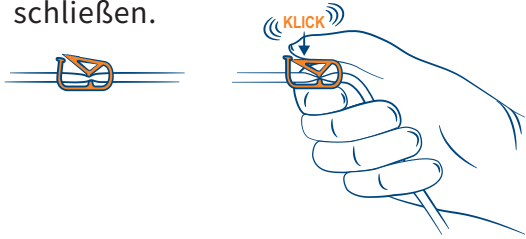


**6** | Schutzhülle am Einführstift abziehen, ggf. unter leichter Drehbewegung.




**7** | Einführstift in das Sicherheitsventil schieben. Das Einrasten ist hör- und spürbar.



**8** | Das Reservoir stets unterhalb der Katheter-Austrittsstelle halten.

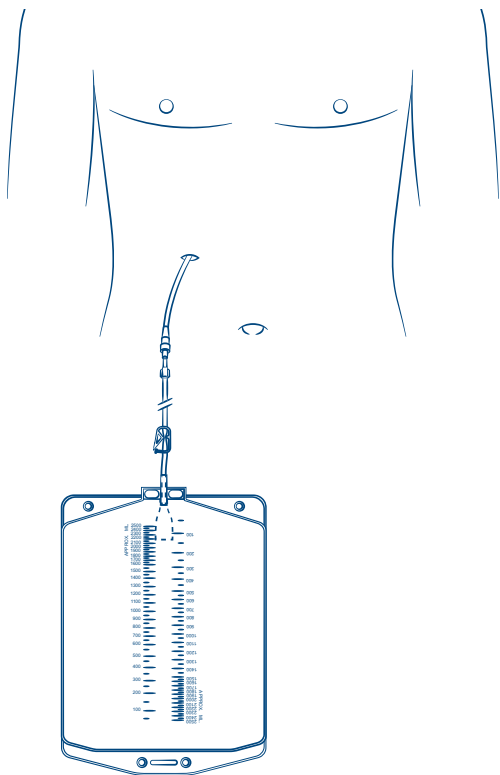

**9** | Quetschklemme öffnen. Die Drainage beginnt.

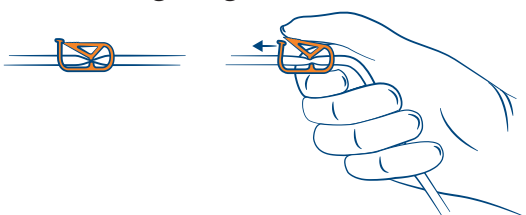


**10** | Nach erfolgter Drainage Quetschklemme am Anschlusschlauch schließen.




**11** | Sicherheitsventil und Anschlusschlauch trennen.



**12** | Sicherheitsventil in die Verpackung eines Alkoholtupfers stecken und reinigen (30 Sekunden Einwirkzeit).

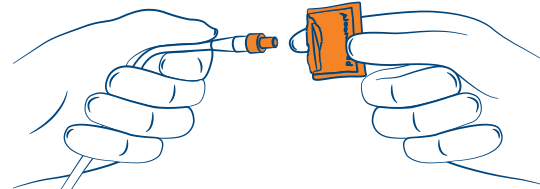

**13** | Anbringen einer neuen Silikonkappe oder der Schutzkappe.

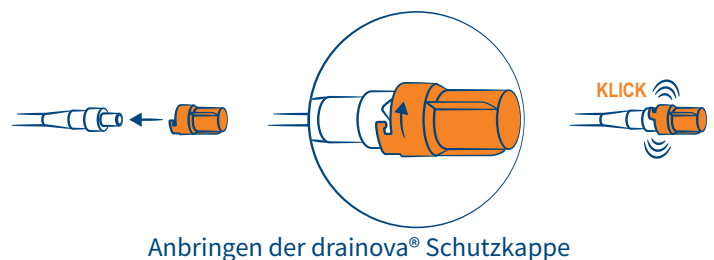




# Drainage-Anleitung | PleurX™ Drainage-Set

Art. Nr.: 50-7500B, 50-7500B/4, 50-7510, 50-7510/4 | Bei Ableitung durch Vakuum




**Hinweis:** Die jeweils relevanten Bereiche des Produktes sind farblich hervorgehoben. Bitte zusätzlich die detaillierte Gebrauchsanweisung sowie die darin enthaltenen Warnhinweise beachten.


- 1** | Das Paket mit dem Verbandsmaterial öffnen und auf dem sterilen blauen Tuch bereitlegen. Innenseite des Tuchs nicht berühren.

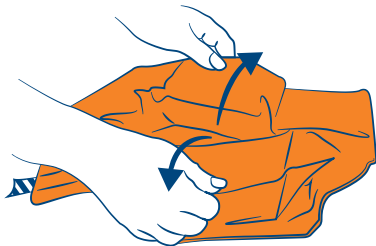

- 2** | Die Handschuhe an der gefalteten Manschette wie gezeigt aufnehmen.

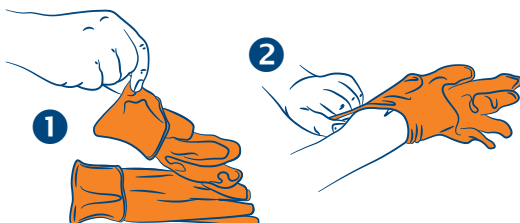


- 3** | Rad an der Rollklemme in Richtung Flasche drehen, um die Klemme vollständig zu schließen.

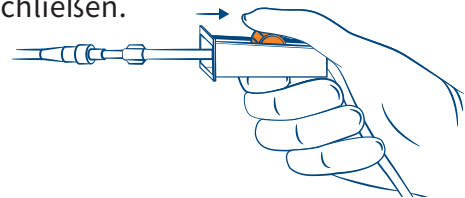

- 4** | Die Abdeckung von der Zugangsspitze entfernen, die Zugangsspitze wieder auf die sterile blaue Verpackungsfolie legen.




- 5** | Die Schutzkappe des Katheterventils durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und leichtes Ziehen entfernen.

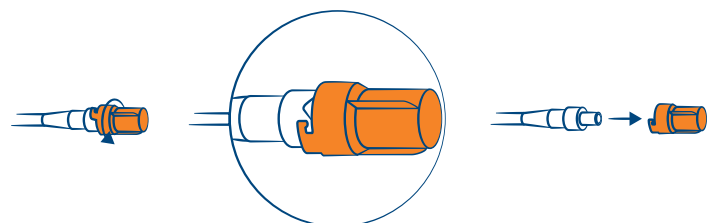




- 6** | Den Bereich um die Ventilöffnung mit einem Alkoholtupfer reinigen.

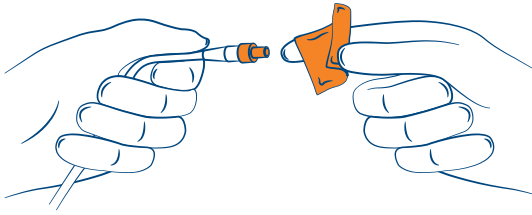


- 7** | Die Zugangsspitze fest in das Katheterventil einführen. Die Zugangsspitze rastet hörbar und fühlbar ein.




- 8** | Zum Entfernen der Sicherheitskappe den oberen Teil des Flansches fassen und nach außen ziehen.

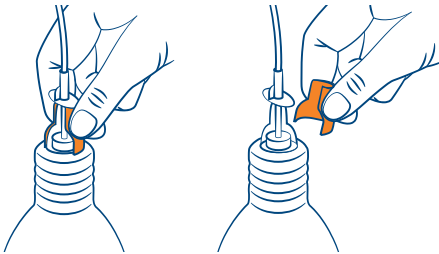


- 9** | Den weißen Einführdorn vorsichtig nach unten drücken, um das Foliensiegel zu durchstechen.

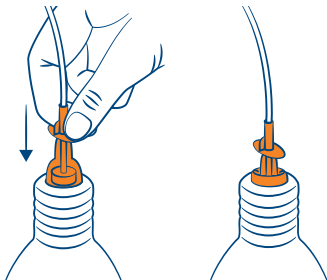

- 10** | Das Rad der Rollklemme von der Vakuumflasche wegdrehen, um mit der Drainage zu beginnen. Der Flüssigkeitsstrom kann durch teilweises Schließen der Rollklemme verlangsamt werden.

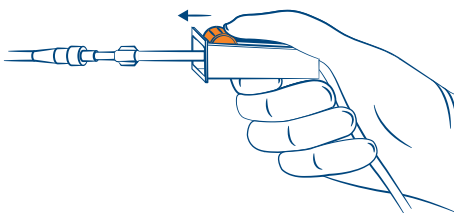


- 11** | Wenn keine Flüssigkeit mehr fließt oder die Flasche gefüllt ist, die Rollklemme vollständig schließen.

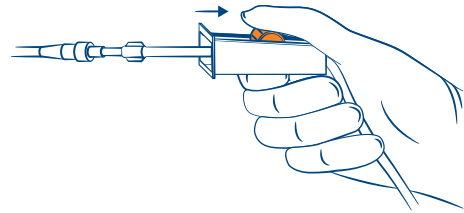


- 12** | Die Zugangsspitze mit einer festen, gleichmäßigen Bewegung aus dem Ventil ziehen.



- 13** | Das Katheterventil mit einem neuen Alkoholtupfer reinigen.

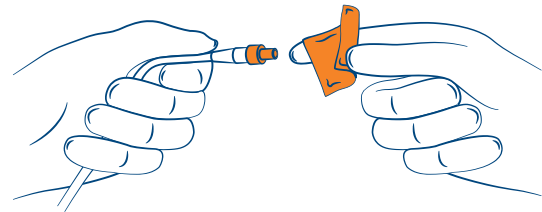

- 14** | Die neue Schutzkappe auf das Katheterventil setzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis sie hörbar einrastet.

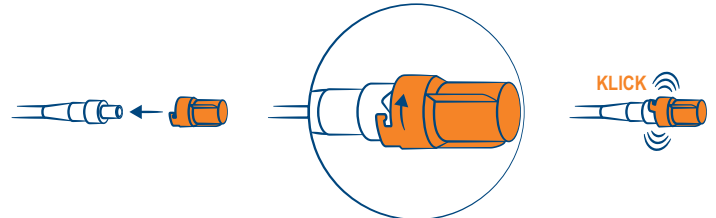

ewimed