


Ihre App für zuhause

Drainagen einfach speichern &
im Blick behalten!

ewimed




QR-Code scannen und schon
kann's losgehen! Oder online
unter **app.ewimed.at**

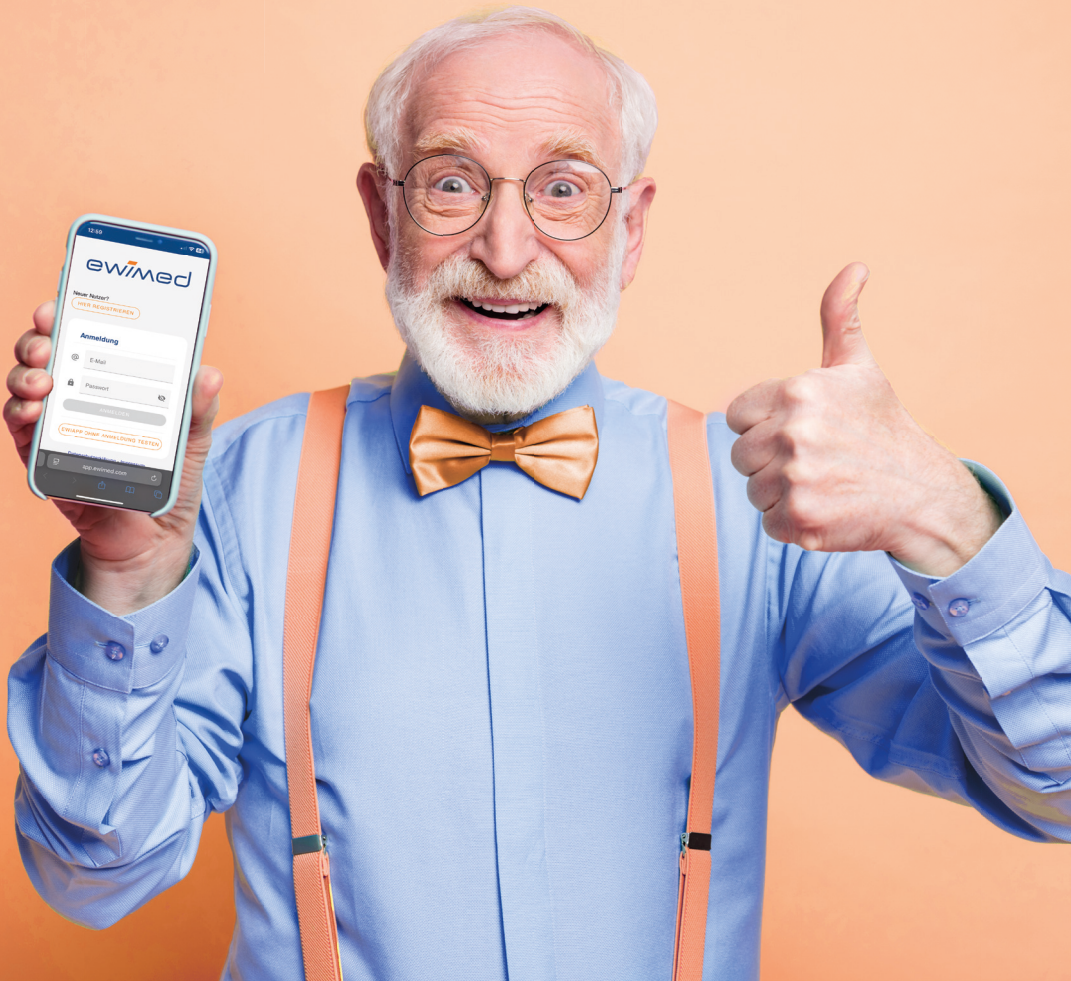

Mit der ewiApp können Sie Ihre Drainagen ganz leicht dokumentieren, anschauen und mit anderen teilen.

So behalten Sie den Überblick!

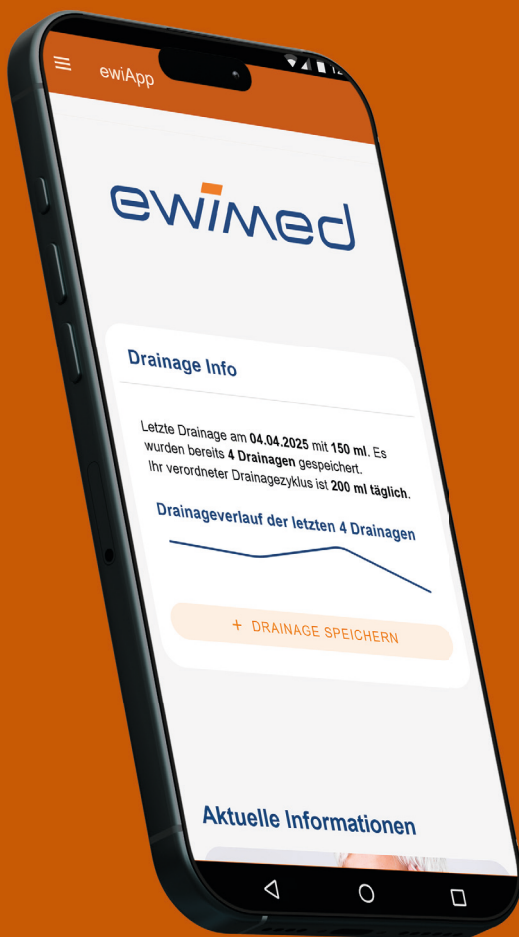

Unsere ewiApp wird stetig weiterentwickelt. Deshalb kann es vorkommen, dass sich die Abbildungen in dieser Anleitung leicht von der aktuellen App-Version unterscheiden.



Schritt 1

ewiApp öffnen

Sie haben zwei einfache Möglichkeiten, um in die App zu gelangen:

- 1 | Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones.



- 2 | Oder geben Sie diesen Link in den Internetbrowser (z.B. in Google Chrome oder Safari) ein: <https://app.ewimed.at/>

WEITER ZU SCHRITT 2 →



Schritt 2

Registrieren – Ihr Zugang zur ewiApp

Damit Sie die App in vollem Umfang nutzen können, müssen Sie sich einmalig registrieren. So geht's:





3 | Klicken Sie auf „**Hier registrieren**“.

4 | Geben Sie nun Ihre **E-Mail** ein und wählen Sie ein sicheres **Passwort** (gerne können Sie dies auch hier eintragen, um es nicht zu vergessen).

E-Mail: _____ Passwort: _____

5 | Akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen.

6 | Klicken Sie dann ganz unten auf „**Registrieren**“.

7 | Werfen Sie nun einen Blick in Ihr E-Mail-Postfach. Dort sollten Sie eine Mail von appsupport@ewimed.com bekommen haben – falls Sie keine Mail finden, schauen Sie auch in Ihrem Spam-Ordner nach.

8 | Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um wieder in die ewiApp zu gelangen.

WEITER ZU SCHRITT 3 →



Schritt 3

Dateneingabe

- 9 | Geben Sie nach einem Klick auf den „**Weiter zur Dateneingabe**“-Button die abgefragten Daten ein.
- 10 | Akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen.
- 11 | Bestätigen Sie die Eingabe Ihrer Daten, indem Sie auf „**Benutzerdaten speichern**“ klicken.
- 12 | Jetzt sind Sie startklar – klicken Sie auf „**App starten**“.


Beim ersten Mal führt Sie die App Schritt für Schritt durch die wichtigsten Funktionen.



Schritt 4

Drainage speichern

So speichern Sie eine Drainage:

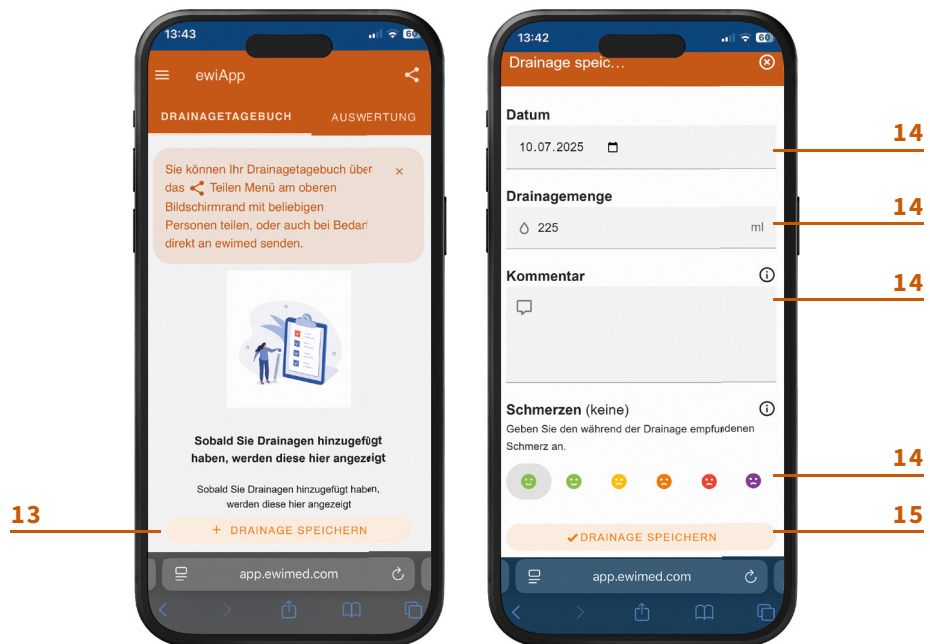

13 | Drücken Sie auf den „+ Drainage speichern“ Button auf der Startseite.

14 | Geben Sie alle relevanten Daten ein (Datum, Menge, etc.).

15 | Tippen Sie auf „Drainage speichern“, um den Eintrag zu sichern.

WEITER ZU SCHRITT 4 ➔



Schritt 5


Gespeicherte Drainagen anschauen

Ihre bisherigen Drainagen können Sie im Drainagetagebuch einsehen.

16



17

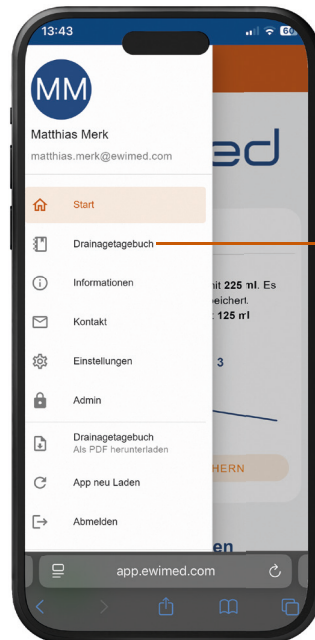

- 16 | Öffnen Sie das Seitenmenü, indem Sie oben links auf den Menü-Button klicken.
- 17 | Wählen Sie im Seitenmenü „Drainagetagebuch“ aus. Hier sehen Sie eine Übersicht sowie Diagramme zu Ihren gespeicherten Drainagen.


WEITER ZU SCHRITT 5 ➔



Schritt 6

Drainagetagebuch herunterladen oder teilen

Ihr Tagebuch können Sie einfach sichern oder weitergeben:

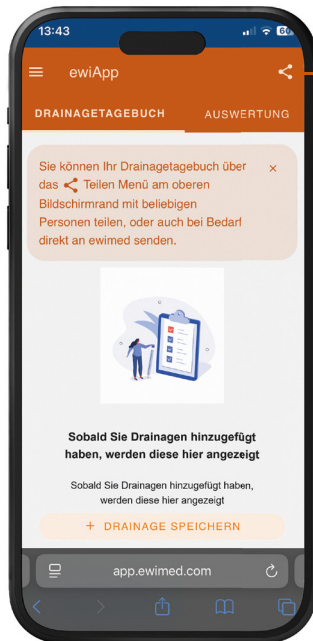

18

18 | Klicken Sie im Drainagetagebuch oben rechts auf den Teilen-Button.

19 | Wählen Sie aus, ob Sie Ihr Drainagetagebuch als PDF oder CSV herunterladen oder mit ewimed oder anderen Personen teilen wollen.



Glückwunsch!

Sie haben die ersten Schritte in der ewiApp gemeistert!

Noch mehr entdecken!

Die ewiApp bietet zudem noch einige weitere Funktionen und interessante Informationen. Viel Spaß beim Entdecken!

Haben Sie Fragen oder brauchen Hilfe?

Schreiben Sie uns an appsupport@ewimed.com oder erreichen Sie uns telefonisch unter +43 2231 22500-0
– wir helfen Ihnen gerne weiter!

MATTHIAS



EMMA



This image shows a full page of dot grid paper. The background is white, and it is covered with a regular pattern of small, dark grey dots. The dots are arranged in straight horizontal and vertical rows, creating a grid-like appearance. There are no margins, text, or other markings on the page.

ewimed

